


SCHULTZE – komplet 111 71 65000

Aparát SCHULTZE slouží jako nástroj užívaný pro diagnózu sterility a při hysterosalpingografii (HSG) dle prof. Dr. Schultze.

Principem metody je vstříknutí rtg kontrastní látky do děložní dutiny a vejcovodů. Metoda umožňuje posoudit velikost a tvar dělohy a u vejcovodů jejich průměr a průchodnost.

Provedení HSG je založeno na zastavení čípku v zrcadlech, dezinfekci čípku, zavedení nástroje do dutiny děložní, který umožňuje kontrolovanou aplikaci rtg kontrastního roztoku za současného zamezení jeho zpětného průniku hrdlem dělohy do pochvy. Dle velikosti čípku je nutné vybrat správnou velikost konusu. Dále se aplikuje rtg kontrastní látka za současné kontroly na štítu a dokumentace se provádí 1-2 snímky

- manometr s rozsahem 0 – 200 mm Hg, dílek 10 mm Hg
- injekční stříkačka 20 ml s LL
- kuželík, 3 různé velikosti

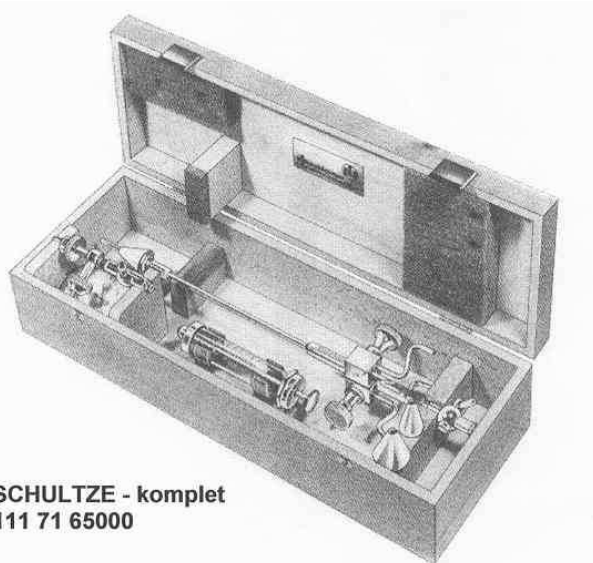

SCHULTZE - komplet
111 71 65000

Upozornění

Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Mohou jej tedy používat pouze pracovníci ve zdravotnictví, splňující předpoklady, stanovené obecně platnými právními či interními zdravotnickými předpisy.

Katalog „GYNEKOLOGIE“ , str.

3B instruments
Petrovická 857
592 31 Nové Město na Moravě
Tel./fax 566 618 135,566 618 317
E-mail: 3b@3b-instruments.cz