


Návod na použití ALGERBRUSH II

*** Před použitím nástroje si prosím přečtěte následující instrukce ***

- Algerbrush musí být sterilizován před počátečním použitím a po každém dalším použití, více informací naleznete v odstavci sterilizace
- Upínací pouzdro a vrtáček drží pohromadě třením a mohou se přepravou uvolnit. Před každým použitím zkontrolujte:
 1. zda brousek lícuje s upínacím pouzdrém
 2. zda upínací pouzdro lícuje s násadcem motoruPokud některá z částí je uvolněná, může dojít k poranění pacienta, v případě, že se některá z částí uvolní.

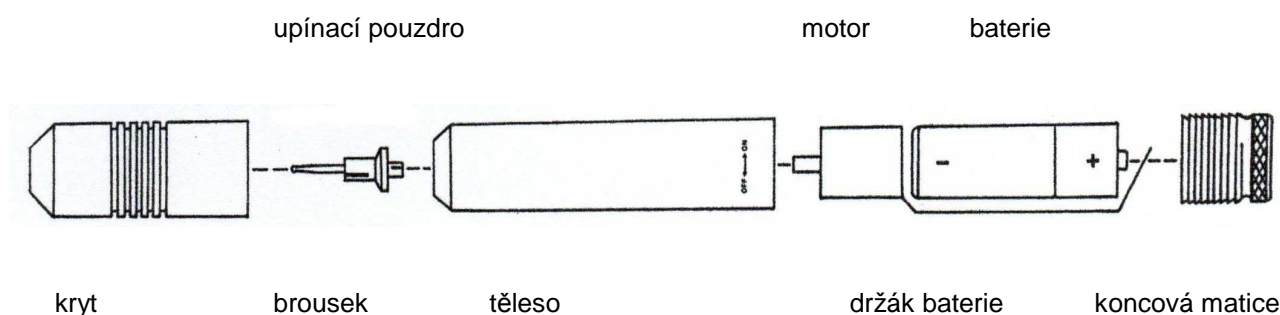

Zacházení s přístrojem:

- pro spuštění přístroje zašroubujte koncovou matici vpravo ON
- pro vypnutí otáčejte vlevo OFF, až se motor zastaví

Výměna baterie:

- odejměte brousek a upínací pouzdro
- vyšroubujte koncovou matici
- vysuňte motor a baterii, spolu s držákem baterie z tělesa a baterii vyjměte
- vložte novou baterii do držáku baterie (- pól směrem k motoru)
- vsuňte motor, baterii spolu s držákem baterie zpět do těla
- ujistěte se, že motor je dobře v pouzdře upevněn
- zašroubujte koncovou matici

Instalace vrtáku a upínacího pouzdra:

- pro instalaci se ujistěte, že motor pracuje
 1. jemně zatlačte vrták spolu s upínacím pouzdrém na násadec motoru
 2. čelo upínacího pouzdra by mělo být blízko tělesa, ale nemělo by se jej dotýkat
 3. vypněte motor, pokud jej nebudete používat
- pro odstranění,
 1. uchopte dolní část upínacího pouzdra a vytáhněte z násady motoru nebo
 2. případně jemně vypáče pomocí vhodného nástroje
 3. vypněte otáčení, pokud jej nebudete používat
- pro výměnu brousku,
 1. odejměte brousek a upínací pouzdro
 2. zatímco uchopíte dolní část upínacího pouzdra prsty, uchopte násadu brousku pinzetou a oddělte
 3. pro vložení nového sterilizovaného brousku použijte pinzetu (uchopte uprostřed násadce), potom zatlačte upínací pouzdro na dno brousku než dosedne.


Údržba brousku a upínacího pouzdra:

- Upínací pouzdro a brousek drží pohromadě třením a mohou se přepravou uvolnit. Upevněte je následujícími způsoby
- Pokud se upínací pouzdro začne uvolňovat, sevřete dolní část upínacího pouzdra jemně do malých kleští viz obrázek I.
- Pokud se brousek začne uvolňovat v upínacím pouzdře, uchopte delší část upínacího pouzdra do malých kleští viz obrázek II.

Obr. I



Obr. II

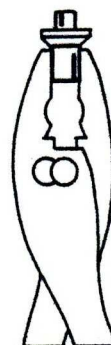

Sterilizace:

*****NEAUTOKLÁVUJTE CELÝ PŘÍSTROJ! ZNIČIL BY SE!*****

- Odejměte brousek a upínací pouzdro z Algerbrush II
- Je možné vyjmout samotný brousek, ale je malý a zacházení s ním je obtížné, proto mějte po ruce vždy několik náhradních vrtáků s upínacím pouzdrem
- Sterilizujte vrtáky s upínacím pouzdrem horkovzdušnou sterilizací nebo sterilizujte v autoklávu
- Pokud sterilizujete v autoklávu, musí být brousek **důkladně** vysušen, aby nedošlo ke korozi.
- Pouzdro čistěte otíráním za použití prostředků na bázi alkoholu.