

Světlovodné háky pro operace prsů.

Upozornění

Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Mohou jej tedy používat pouze pracovníci ve zdravotnictví, splňující předpoklady, stanovené obecně platnými právními či interními zdravotnickými předpisy.

Světlovodný hák může být sterilizován běžným způsobem v autoklávu při teplotě do 134° C a umýván v běžných myčkách. Čím je čas sterilizace kratší, tím se zvyšuje doba životnosti kabelu. Doba sterilizace je odvislá od použitého sterilizátoru a nesmí být ovlivňována uživatelem.

Při nakládání do sterilizačního prostředku musí být dodržována předepsaná koncentrace. Při vyšší koncentraci dochází k poškození konců světlovodu. Doporučujeme konce světlovodů chránit manžetami. Při pečlivém zacházení není možné, díky robustní konstrukci, kabel poškodit. Vyvarujte se extrémních ohybů, extrémních tahů a chraňte kovové části před působením kyselin a louhů. Vyhněte se čištění fazety vstupu a výstupu světlovodu od lepidla.

Průřez světlovodu musí souhlasit s průřezem endoskopu, jinak vystavujete výstup světlovodu poškozenímu odrazem světla.

Postup při rozebírání a čištění světlovodného háku.

