

Laparoskopické nástroje

Upozornění

Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Mohou jej tedy používat pouze pracovníci ve zdravotnictví, splňující předpoklady, stanovené obecně platnými právními či interními zdravotnickými předpisy.

Pokyny pro čištění a dezinfekci

Laparoskopické nástroje a jejich příslušenství musí být bezprostředně po použití dekontaminovány a následně důkladně očištěny. Nesmí dojít k zaschnutí nečistot. Rozebíratelné nástroje musí být rozebrány a pečlivě vyčištěny. Tyto čistíme kartáčky (96 000-02, 96 000-03) odpovídajících průměrů. U nerozebíratelných nástrojů čistíme proplachovací kanály a dutiny proplachováním. K proplachu doporučujeme čistící pistoli (89 500-00), napojenou na vodovodní řád nebo na tlakový vzduch.

Nepřípustné je čištění v ultrazvukových myčkách částí monopolárních a bipolárních nástrojů, které jsou v bezprostředním elektrickém kontaktu (koncovky bipolárních nástrojů, držadla, adaptéry, VF kabely).

Doporučujeme, aby nástroje nebyly dlouhodobě vystavovány působení halogenových prvků, alkalických roztoků, chloridů, chloranů a kyselin, aby byly ponechávány v dezinfekčním a čistícím prostředku po dobu nutnou, doporučenou výrobcem těchto prostředků. Dodržujte předepsané koncentrace.

Po každém způsobu čištění musí být nástroje makroskopicky čisté. Samozřejmostí je hygienická, funkční a technická kontrola.

Před sterilizací musí být nástroje dokonale suché.

Suché nástroje pak před sterilizací promažeme v zámkové a kloubové části medicíálními oleji (139 08 93000).

Pokyny pro sterilizaci

Pro laparoskopické nástroje doporučujeme sterilizaci parou do teploty 134° C. Vždy je třeba řídit se doporučením výrobce sterilizačních přístrojů.

Nepřípustná je horkovzdušná sterilizace, obzvláště pro části z pryže, umělé hmoty, umělou hmotou potažené, kabely a držadla elektrod.