

## Návod k použití instrumentačního oleje INSTRU CARE

**INSTRU CARE** je instrumentační olej, který slouží k ošetření a ochraně lékařských nástrojů, jako jsou chirurgické, endoskopické, ortopedické a zubolékařské nástroje. **INSTRU CARE** slouží k udržování funkčnosti a udržení hodnoty všech **kovových** nástrojů.

Opatrně na choulostivé umělé hmoty!

**INSTRU CARE** maže zámky, klouby, a pod. a je nezávadný, nenarušuje proces sterilizace. Je příznivý pro materiály a oxidaci stálý do teploty 200° C.

**Použití:** Instrumentační olej se používá po odpovídající přípravě nástroje (dekontaminace, mytí, čištění, sušení, funkční a technická kontrola ) a **před sterilizací**.

**Pozor:** Tlaková nádoba. Chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50° C. Tlakovou nádobu mechanicky nepoškozujte ani ji nevhazujte či její obsah nevstříkujte do otevřeného ohně. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po spotřebování neotevírejte násilím a nevhazujte do ohně. Používejte pouze v dobře větrané místnosti, nevdechujte aerosol. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí okamžitě důkladně propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosahu dětí.