

Oscilační pila pro amputace a autopsii 220 V - návod k údržbě.**Technická data:**

Napájecí napětí 220 V, 50 Hz
Příkon 500 W
Plynulá regulace otáček (6500 – 24000)
Stupeň ochrany II dle VDE 0740
Ochrana proti nebezpečnému dotyku izolováním
Odrušeno
Ochranný bezpečnostní vypínač
Hmotnost 1,5 kg

**Důležité upozornění:**

Při jakékoliv manipulaci typu: čištění, výměny řezacího listu, údržby kyvné vidlice, musí být pilka odpojena od síťového napětí !

Čištění a sterilizace:

Pomocí přiložených klíčů 12 a 13 mm odšroubujeme řezací list. Přední díl uvolníme po odšroubování čtyř šroubů a pomocí rovněž přiloženého imbus-klíče. Přední díl odejmeme. Tyto díly potom sterilizujeme v autoklávu.

Motorový systém je třeba otřít plošným dezinfekčním prostředkem s čisticím účinkem. Jako pomůcku použijte látky bez chloupků nebo jemné kartáče. Po následujícím postřiku dezinfekčním sprejem otřete povrchy po uplynutí předepsané doby působení látkou.

Sestavení:

Po sterilizaci se provádí sestavení v opačném sledu, jak bylo popsáno v odstavci čištění.

Další upozornění:

Po každém autoklávování namažeme kyvnou vidlici a konec hřídele speciálním tukem před složením pilky.

Síťovou šňůru pravidelně kontrolujeme a při poškození vyřadíme. Motor je bezúdržbový. V rozmezí 2-3 roků je nutné jej v odborné elektrodílně nechat přezkoušet.

3B instruments
Petrovická 857
592 31 Nové Město na Moravě
Tel./fax 566 618 135, 566 618 317
E-mail: 3b@3b-instruments.cz