


Oscilační pila na sádrové obvazy 220 V

Upozornění

Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Smí jej používat pouze klinicky zaškolený a kvalifikovaný personál.

Technická data:

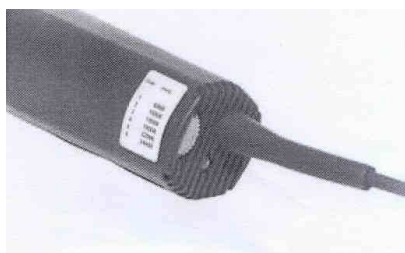

Napájecí napětí 220 V, 50 Hz
Příkon 500 W
Plynulá regulace otáček (6500 – 24000)
Stupeň ochrany II dle VDE 0740
Ochrana proti nebezpečnému dotyku izolováním
Odrušeno
Ochranný bezpečnostní vypínač
Hmotnost 1,5 kg

Důležité upozornění:

Při jakékoliv manipulaci typu: čištění, výměny řezacího listu, údržby kyvné vidlice, musí být pilka odpojena od síťového napětí !

Pravidelná údržba.

Pravidelnou údržbou je čištění oscilační pilky od zbytků sádrových ob vazů. Síťovou šňůru kontrolujeme a při poškození ji vyřadíme.

Výměna řezacího listu.

Pomocí příložených klíčů 11mm odšroubujeme řezací list, který potom nahradíme řezacím kotoučem příslušného typu.

Další upozornění:

V rozmezí 2-3 roků je nutné nechat přezkoušet motor oscilační pilky v odborné elektrodílně.

Ve stejném intervalu je vhodné namazat kyvnou vidlici nazacím tukem. Mechanismus kyvné vidlice je přístupný po odmontování předního dílu oscilační pilky, který je k tělesu motoru přišroubován čtyřmi imbus - šrouby.

Sestavení provádíme v opačném sledu.

3B instruments

Petrovická 857

592 31 Nové Město na Moravě

Tel./fax 566 618 135, 566 618 317

E-mail: 3b@3b-instruments.cz

